

ウレタンマスク

軽くて呼吸がしやすい、長時間使用しても耳が痛くならない花粉マスク！
密着感とフェイスラインの美しさを両立するためカタチを徹底的に追求！フェイスラインにフィットし輪郭をシャープにみせます。つらい時期も「3D ウレタンマスク」で気分爽快

【ご使用方法】

STEP1

マスクの上下を確認してください



STEP2

マスクを顔に当て
耳かけ部分に耳に
当てます。



STEP3

隙間ができない
ようにマスクを
軽く押さえます。



【使用上の注意】

■皮膚に異常がある時は使用をお控えください。■使用中に皮膚やその他に異常を感じましたら、直ちに使用を中止してください。■本品は有害な粉塵やガス等を防ぐことはできません。■乳児や呼吸器に異常がある方、自らの意志により脱着ができない方は使用しないでください。■製品の性質上、変色することがありますが、品質には問題はありません。■個人差により、眼鏡が曇る場合があります。運転の際などは十分ご注意ください。■洗浄の際は必ず中性洗剤をお使いください。その後も製剤をお使いになると、劣化、変質する可能性があります。■乳幼児の手の届かないところで保管してください。■洗濯される場合、中性洗剤を薄めてから軽く手洗いを行い、十分乾かしてご使用ください。■伸縮性がある素材ですが、強く引っ張ると切れてしまうことがあります。■高温多湿や直射日光を避けて保管してください。

品名： マスク
素材：ポリウレタン（本体）

発売元 株式会社 T K サービス

※破棄の際は自治体の指示に従って破棄してください。

ウレタンマスク

軽くて呼吸がしやすい、長時間使用しても耳が痛くならない花粉マスク！
密着感とフェイスラインの美しさを両立するためカタチを徹底的に追求！フェイスラインにフィットし輪郭をシャープにみせます。つらい時期も「3D ウレタンマスク」で気分爽快

【ご使用方法】

STEP1

マスクの上下を確認してください



STEP2

マスクを顔に当て
耳かけ部分に耳に
当てます。



STEP3

隙間ができない
ようにマスクを
軽く押さえます。



【使用上の注意】

■皮膚に異常がある時は使用をお控えください。■使用中に皮膚やその他の異常を感じましたら、直ちに使用を中止してください。■本品は有害な粉塵やガス等を防ぐことはできません。■乳児や呼吸器に異常がある方、自らの意志により脱着ができない方は使用しないでください。■製品の性質上、変色することがありますが、品質には問題はありません。■個人差により、眼鏡が曇る場合があります。運転の際などは十分ご注意ください。■洗浄の際は必ず中性洗剤をお使いください。その後も製剤をお使いになると、劣化、変質する可能性があります。■乳幼児の手の届かないところで保管してください。■洗濯される場合、中性洗剤を薄めてから軽く手洗いをを行い、十分乾かしてご使用ください。■伸縮性がある素材ですが、強く引っ張ると切れてしまうことがあります。■高温多湿や直射日光を避けて保管してください。

品名： マスク

素材：ポリウレタン（本体）

発売元 株式会社TKサービス

※破棄の際は自治体の指示に従って破棄してください。